

Инструкция по использованию медицинского изделия

Одежда медицинская одноразовая из нетканого материала: Халат

Халат медицинский одноразовый обеспечивает необходимый уровень защиты пользователя и помогает соблюдать санитарно-эпидемиологические/гигиенические требования.

Порядок (алгоритм) использования по назначению (применения)

1. Вскройте упаковку;
2. Выньте халат из упаковки;
3. Кисти обеих рук поместите в проемы рукавов;
4. Убедитесь, что края манжет находятся у основания кистей;
5. Медсестра должна подтянуть халат на плечи, прикасаясь только к внутренней поверхности халата;
6. Зафиксировать горловину с помощью завязки;
7. Зафиксировать фиксатор пояса.



В медицинских организациях использованные халаты подлежат обеззараживанию и удалению, как отходы класса Б или В.

Меры предосторожности

- Не используйте поврежденное изделие;
- Не используйте изделие, если упаковка открыта или повреждена;
- Не используйте изделие по истечению срока годности;
- Не используйте изделие не по назначению;
- Не используйте изделие повторно;

Условия хранения и транспортировки

В закрытых и сухих помещениях, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги, в шкафах, либо стеллажах на высоте не менее 30 см от уровня пола, при температуре +15°C +35 °C и относительной влажности не более 65%, вдали от прямых солнечных лучей,

автоклавов, обогревателей и др., источников тепла.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок хранения халата– 5 лет с даты изготовления.

Производитель:

**ООО «Кэртон Медикал энд Протектив Продактс, КО., ЛТД, КНР,
Carestone Medical & Protective Products Co., Ltd., office at room 204, Building 2,
Xinyuan area, Yingbin road, Development zone, Anqing city, Anhui province, Republic
of China.**